



Anleitung zu den Gurgelröhrchen:

- Sie erhalten eine Tüte mit bereits vorbereitetem Aufkleber für Ihr Kind und 2 Röhrchen.
- Beschriften Sie bitte ein Röhrchen **mit einem wasserfesten Stift** mit dem Buchstaben „P“, darin sollen immer ca. 2ml Gurgelat für den Pool sein. Das wird an den Testtagen von den Kindern in den Pool geschüttet. Dieses geleerte Röhrchen bekommen die Schüler in der Tüte wieder mit nach Hause. Waschen sie es mit warmem Wasser aus, es kann und soll wiederverwendet werden. Bitte nicht auskochen!
- Beschriften Sie das 2. Röhrchen **mit einem wasserfesten Stift** mit Name, Klasse und einer Telefonnummer, unter der Sie auch abends noch erreichbar sind. Das ist die Rückstellprobe. Darin sollen sich ca. 4ml Gurgelat befinden. Diese Rückstellprobe bleibt vorläufig an der Schule und wird nur im Falle eines positiven Pools ausgewertet.
- Nach Abgabe der Rückstellprobe an der Schule erhalten Sie oder Ihre Kinder ein neues Röhrchen. Beschriften Sie dieses 3. Röhrchen **mit einem wasserfesten Stift** mit Name, Klasse und einer Telefonnummer, unter der Sie auch abends noch erreichbar sind. Das ist die Rückstellprobe für den nächsten Testtag. Darin sollen sich wieder ca. 4ml Gurgelat befinden. Diese Rückstellprobe bleibt an der Schule und wird nur im Falle eines positiven Pools ausgewertet.
- Am nächsten Testtag schütten die Kinder die 2ml aus dem Röhrchen „P“ in den Pool und lassen die Rückstellprobe für eine etwaige Auswertung an der Schule. Dafür erhalten die Kinder die Rückstellprobe vom letzten Testtag zusammen mit dem geleerten Röhrchen „P“ wieder mit nach Hause. Diese Röhrchen bitte wieder auswaschen und am nächsten Testtag wiederverwenden.
- Sollte ein Röhrchen mal kaputt gehen, haben wir natürlich Ersatz.